

東昇牌

SKX-2000K

WINDOWS 软件

安装及使用说明


徐州铭昇电子科技有限公司 V1.8

公司地址：徐州市云龙区江海不锈钢城 4 号楼 208 联系电话：0516-83460606  
公司网址：[WWW.Ecomednet.com](http://WWW.Ecomednet.com) E\_mail：[XZfrd@163.com](mailto:XZfrd@163.com)

首先感谢您购买我公司的产品！

## 第一章 软件的安装

- 1、将安装包下载并解压后，出现 4 个文件，3 个安装文件，一个使用说明，也就是本 WORD 文件。
- 2、选择 SETUP.EXE（带显示器图标的 SETUP 文件）。

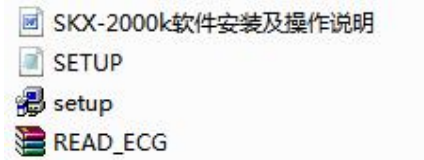

- 3、将会出现以下界面，选择确定进入到下一步；



- 4、出现如下界面后，点击图示位置，进入下一步；




公司地址：徐州市云龙区江海不锈钢城 4 号楼 208 联系电话：0516-83460606  
公司网址：[WWW.Ecomednet.com](http://WWW.Ecomednet.com) E\_mail：[XZfrd@163.com](mailto:XZfrd@163.com)

5、如果在安装过程中出现冲突或者错误提示时，请选择忽略或者保存原文件；



6、安装完成后，出现安装成功提示窗口。

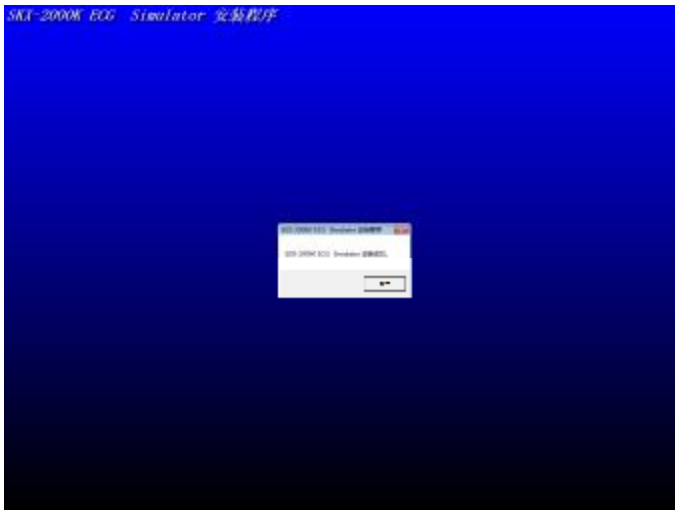

7、到 windows 的“开始” - “程序”中查找如下图中的软件文件，选择 SKX-2000K，运行程序。（注意，请在运行程序前先连接 USB 串口到计算机，并连接另一端到 SKX-2000K 仪器的通信口，否则会出现错误提示。）



## 第一章 软件的操作说明

1、在运行程序前，首先必须要通过串口电缆连接 SKX-2000K 到计算机，(随机配送一条 USB 转串口)，请确认通信电缆连接完成后再运行程序。程序运行后出现如下界面，软件将自动进行与 SKX-2000K 的通信连接。




2、当与 SKX-2000K 的连接完成时，会出现“连接成功”状态提示，否则出现如下窗口



连接完成后，灰色的按钮“心率不齐数据下载”，“ECG 库数据下载”将变为可用按钮，选择相应的按钮，将进入不同的数据下载窗口。


3、ECG 库数据下载窗口：

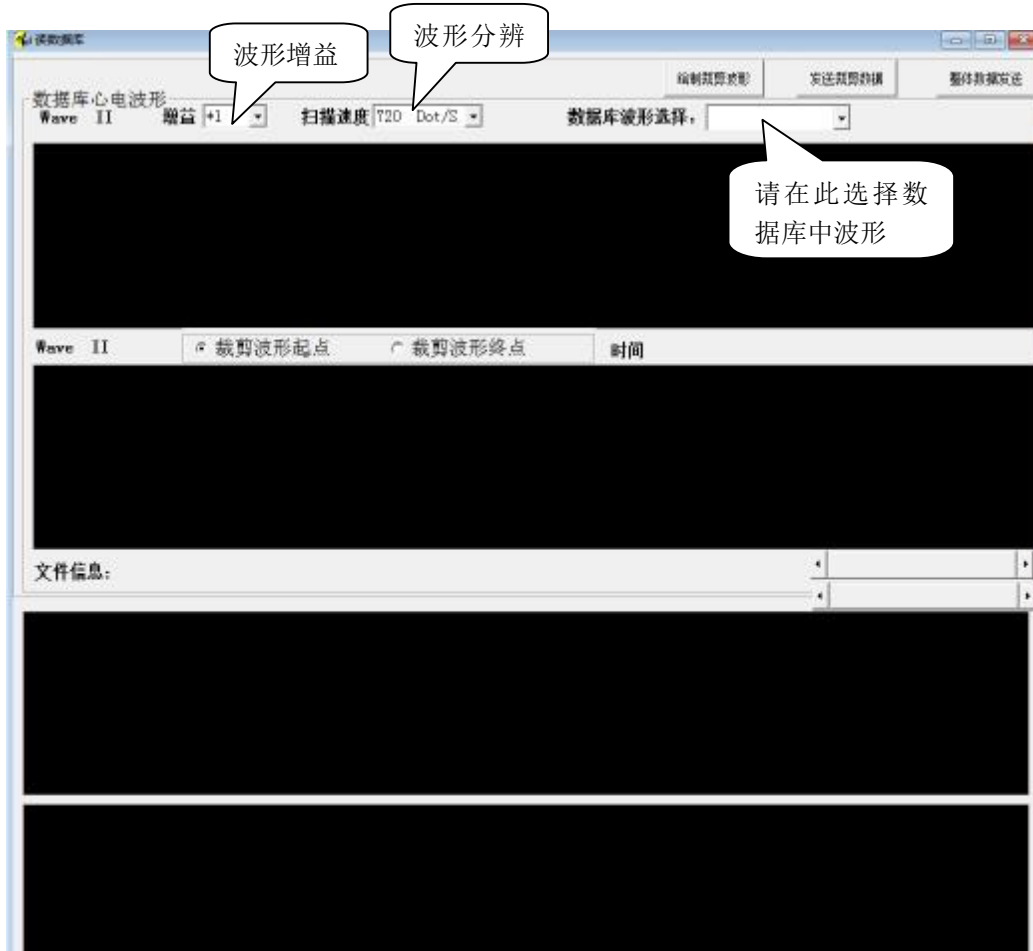

4、当选择后数据库中的波形后，窗口如图所示

此时可以改变波形的增益、扫描速度等参数进行更详细的观察波形

更改波形增益后，波形会随之变化，此时发送数据到 SKX-2000K，波形增益也会变化，请注意此变化。

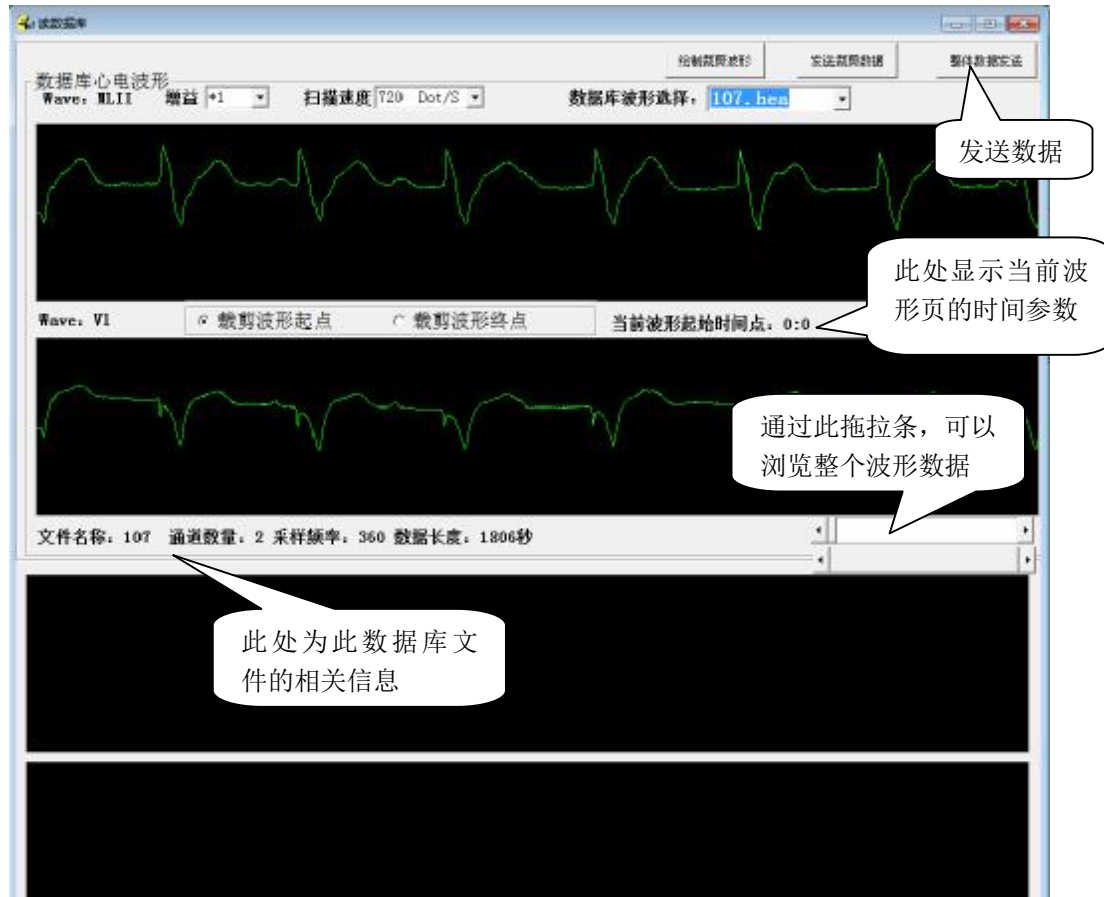


在此状态下，选择“整体数据发送”按钮，将会把当前的数据文件全部数据发送到 SKX-2000K 中进行波形还原。在发送过程中会有窗口提示信息及进度条显示进度。

## SKX-2000K 软件安装及操作说明

如果不选择全部数据下载，则可以进行波形裁剪，裁剪方法是，首先选择“裁剪波形起点”，然后再浏览波形，可以在波形任意位置设置起点。起点设置完成后，请选择“裁剪波形终点”，再次浏览波形，设置波形终点，请注意，波形终点必须要在起点之后，否则会报错！

当裁剪波形的起点和终点选择完成后，选择“绘制裁剪波形”按钮，将在图下方绘制刚刚裁剪的波形。选择“发送裁剪数据”，将会把选择的裁剪后的波形数据发送到 SKX-2000K。

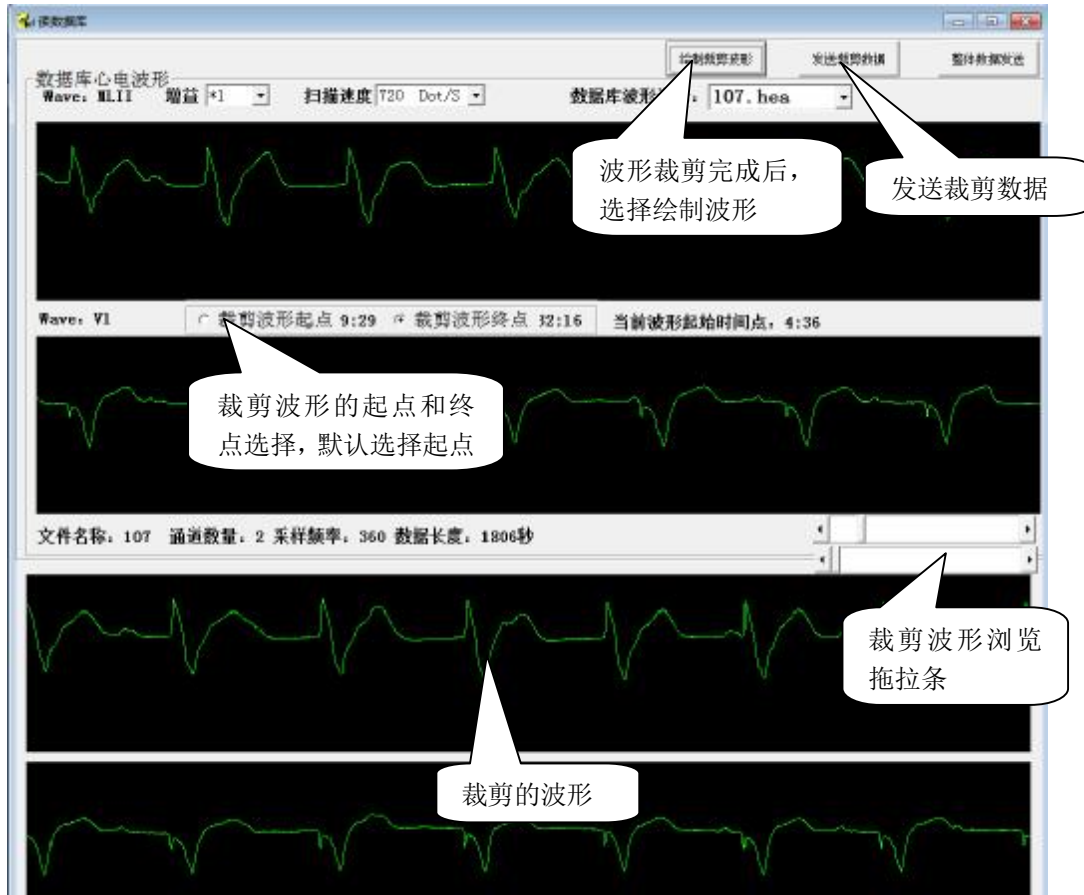

5、心率不齐数据库下载窗口，和 ECG 库下载操作相似，更简单些，因为波形数据较小，所以讲数据全部下载，不再需要进行裁剪。选择波形后直接选择“发送数据”即可。





## SKX-2000K 软件安装及操作说明

---

USB 转串口驱动安装说明:

驱动分为 2 种:

一种是为 WINXP/WIN7(32 位); 一种为 win7 (64 位), 分别压缩为不同的压缩文件。

**注意: 必须正确安装 USB 串口的驱动后, 才可以使 SKX-2000K 与计算机进行数据通信。**

再次感谢您对我公司的信任, 在您使用过程中发现或碰到任何使用问题, 欢迎致电我公司咨询, 您的意见将是我公司产品改进的最大动力!

徐州铭昇公司全体员工